




**LICHTLEITKABEL  
TESTER GM300**

**OUT**


**IN**

## Bedienungsanleitung


**1** Batterie vor Inbetriebnahme anschließen

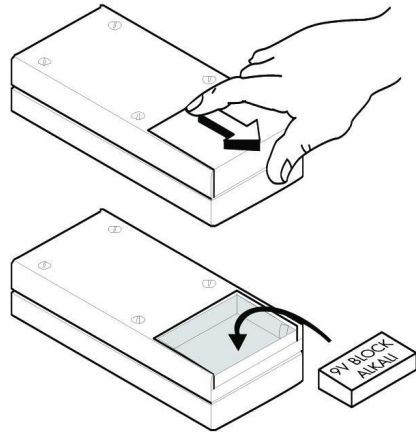

**2** Kaltlichtkabel links anschließen

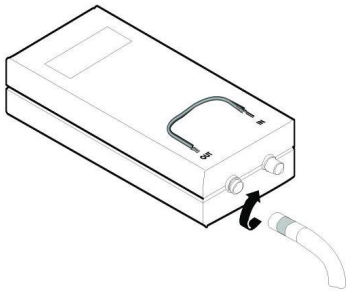

**3** Kaltlichtkabel rechts einstecken und drücken

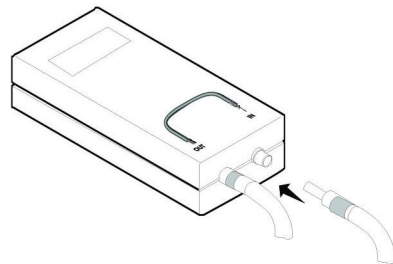

Anzeige 70% - 100% : Kabel OK  
Anzeige <70% : Kabel defekt

**Um richtige Meßergebnisse zu erzielen, empfehlen wir eine jährliche Kalibrierung.**



**LICHTLEITKABEL  
TESTER GM300**


**OUT**

**IN**

## Use instruction


**1**

Attaching the battery before getting started.

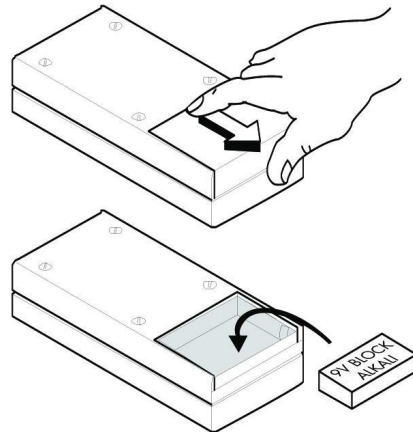


**2**

Attaching optical glass fibre cables on the left.

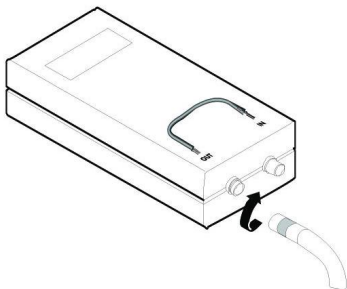

**3**

Plugging in and pushing optical glass fibre cables on the right.

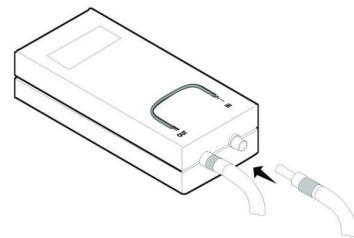

Display: 70 - 100% = cable OK  
Display: < 70% = cable defect

**To achieve right measurement results,  
we recommend an annual calibration.**